

# ***CADD6300 smertepumpe - Skifte av kassett kortversjon***

## **FORMÅL OG OMFANG**

Beskriver skifte av kassett. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy PCA Operatørmanual.

## **Stopp og start:**

Pumpen er laget slik at START/STOPP knappen må holdes inne en tid før den virker. Tre streker (---) vil komme tilsyne ved stopp.

## **Skifte av medikament kassett / fylling av slanger: ASEPTISK TEKNIKK!**

Skifte av kassett foregår ved "non-touch" teknikk. ("ikke ta på" teknikk) Etter grundig håndvask håndteres koblingene med sterile kompresser fuktet med Klorhexidinsprit eller sprit



## **Utstyr:**

Ny kassett, sjekk at innhold og pasientopplysninger stemmer. Sterile kompresser 5 x 5 cm – en pakke – til å vaske koblingen med ved skifte av kassett. Klorhexidinsprit 5mg/ml liniment oppløsning

## **Skifte av kassett uten å fylle slanger/filter:**

- Stopp pumpen.
- Steng slangeklemme ved gammel kassett
- Fukt sterile kompresser med sprit, tørk av koblinger som skal åpnes. Beskytt koblingene med kompressene når du åpner slangen for å skifte kassett
- Bruk nøkkelen, koble av gammel kassett. Alarm vil høres. For å stoppe alarmer trykk **en** gang på START/STOPP knappen
- Fest på nye kassett
- Åpne slangeklemme på ny kassett
- Trykk på NESTE for å se kassettvolum på displayet
- Trykk BEKREFT/SLETT og Kassettvolum vil tilbakestilles til 100 ml
- Start pumpen. Tre streker (---) vil forsvinne fra vinduet, pumpen er da startet. Display viser: INF KasVol 100 ml (evt noe mindre hvis slangesett er fylt)

Dokumenter kassettskifte på [smertepumpeskjema](#).

**Hvis forlengesslange skiftes:** Slangen må fylles før pumpen kobles til pasienten. Fyll slangesettet ved å trykke inn FYLLE SETT knappen til tre streker vises i displayet. Slipp knappen og trykk den inn igjen. Pumpen fyller slangesettet. Når væske kommer ut, slipp knappen og trykk på en av de andre knappene for å komme tilbake til normal meny. **Viktig:** Minste og blå ende av forlengesslangen må være nærmest kassetten (blått mot blått). Størst – og lilla ende skal kobles til filteret.

## **HVIS PROBLEMER:**

Kontakt Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark  
Tlf: 35 00 54 36  
Mellom kl. 0700 – 2200